

## **NASENSAUGER, 0+** Gebrauchshinweise

In den ersten Lebensmonaten atmen Säuglinge ausschließlich über die Nase, daher gehört der Nasensauger in jede Baby-Erstausrüstung.

Im Handumdrehen abgesaugt: mit dem Nasensauger können Sekrete schnell und ganz sanft entfernt werden. Das sehr weiche kleine Silikon-Saugteil ist an Babys Nase angepasst und macht das Einführen in das Nasenloch angenehm und einfach, ohne Verletzungsgefahr. Durch das transparente Silikon-Saugteil wird das abgesaugte Sekret sichtbar. Das ergonomische und funktionelle Design ermöglicht eine sichere, handliche Anwendung. Die Griffmulden bieten komfortablen Halt. Zum Reinigen lässt sich der Nasensauger einfach und schnell auseinandernehmen. Zur hygienischen und platz sparenden Aufbewahrung empfehlen wir das Silikon-Saugteil umgekehrt in den Saugkörper zu stecken.

**Reinigung:** Reinigen Sie den Nasensauger vor der ersten Benutzung mit mildem Reinigungsmittel und warmem Wasser. Sterilisierbar und geeignet für Spülmaschinen.

**Gebrauchshinweise:** Vor dem Einführen in das Nasenloch bitte den Saugkörper zusammendrücken und an ein Nasenloch halten. Das andere Nasenloch mit dem Finger zuhalten. Nun den Saugkörper vorsichtig in das Nasenloch einführen und den Druck auf dem Saugkörper langsam lösen – das Nasensekret wird abgesaugt. Nach jeder Benutzung sofort reinigen.

### **Zur Sicherheit & Gesundheit Ihres Kindes – Warnhinweis!**

Überprüfen Sie den Nasensauger vor jeder Verwendung auf hygienische Sauberkeit und Funktion und tauschen Sie ihn bei Beschädigung sofort aus. Den Saugkörper NIEMALS zusammendrücken, wenn sich der Nasensauger bereits in einem Nasenloch befindet! Bitte verwenden Sie den Nasensauger NIEMALS als Pumpe oder für Ohren und Mundraum. **Der Nasensauger ist kein Spielzeug.**

**WARNUNG: Das Produkt enthält verschluckbare Kleinteile! Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.** Bitte diese Hinweise für spätere Rückfragen aufbewahren.